

Contour[®]
plus ONE[»]
优安进[®][»]

如何配对血糖仪

配对血糖仪

应用程序与血糖仪配对



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

每当Bluetooth® (蓝牙)连接可用时，您的血糖仪与**臻爱管家小程序**可自动进行数据同步



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 配对您的血糖仪

在配对您的**优安进血糖仪**前，请开启您手机上的蓝牙

前往“**设置**”，“**蓝牙**”，按下切换按钮，开启蓝牙



Contour[®]
plus **ONE**)
优安进)

1. 配对您的血糖仪

在配对您的**优安进血糖仪**前，请开启您手机上的蓝牙

前往“**设置**”，“**蓝牙**”，按下切换按钮，开启蓝牙



Contour[®]
plus **ONE**[™]
优安**进**[®]

1. 配对您的血糖仪

在配对您的**优安进血糖仪**前，请开启您手机上的蓝牙

前往“**设置**”，“**蓝牙**”，按下切换按钮，开启蓝牙



Contour[®]
plus **ONE**[™]
优安进[®]

1. 配对您的血糖仪

在配对您的**优安进血糖仪**前，请开启您手机上的蓝牙

前往“**设置**”，“**蓝牙**”，按下切换按钮，开启蓝牙



Contour[®]
plus **ONE**[®]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

首次进入**臻爱管家**小程序后，在蓝牙连接引导页面，将会引导您进行蓝牙配对



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

首次进入**臻爱管家**小程序后，在蓝牙连接引导页面，将会引导您进行蓝牙配对



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

点击“继续”



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

长按优安进血糖仪上的中间按钮，
直到看到试纸接口出现闪烁蓝灯才
放开



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

长按优安进血糖仪上的中间按钮，
直到看到试纸接口出现闪烁蓝灯才
放开



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

长按优安进血糖仪上的中间按钮，
直到看到试纸接口出现闪烁蓝灯才
放开



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

蓝牙配对请求信息会显示在屏幕上



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 配对您的血糖仪

配对成功后，进入**臻爱管家**小程序
首页



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

如果您对**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®智能血糖仪和臻爱管家小程序应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员，并参阅产品使用指南，如欲了解更多资讯或查询您的国家是否有**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®血糖仪，请浏览 www.ascensiachina.com



请变更目标范围，饮食和运动前先咨询您的医疗保健专业人员
获取臻爱管家小程序，用微信扫描 臻爱管家 小程序码或者二维码进入



微信扫一扫，使用小程序



Contour.
plus ONE[®]
优安进[®]

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志及Contour均为健臻(Ascensia Diabetes Care Holdings AG)的商标和及/或注册商标。

©版权所有 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

WWW.ASCENSIACHINA.COM

